



1

ENCIENDA

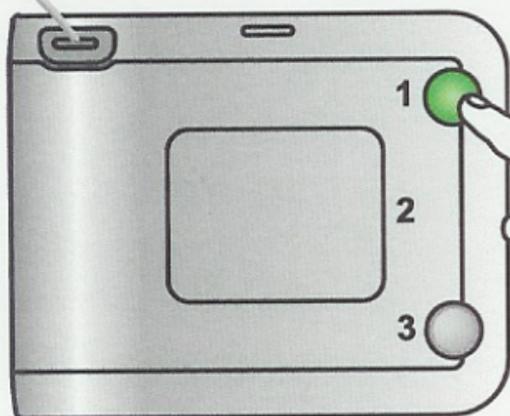


2

Pecho desnudo.
Si es preciso, lave y
seque la piel.

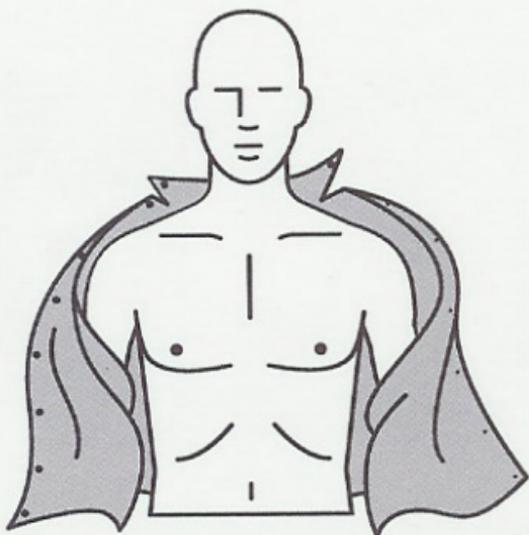


3

Abra la caja gris de electrodos.

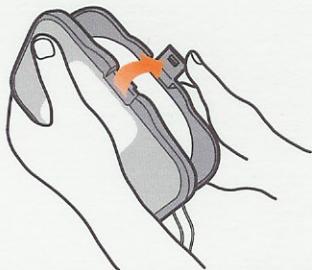


4

Despegue los adhesivos de cada electrodo.

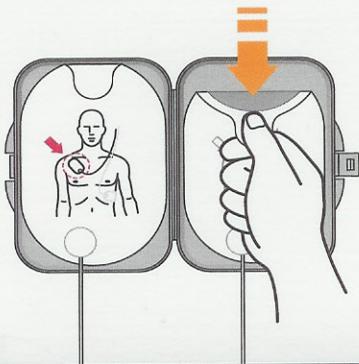

5

Coloque los electrodos en el pecho.

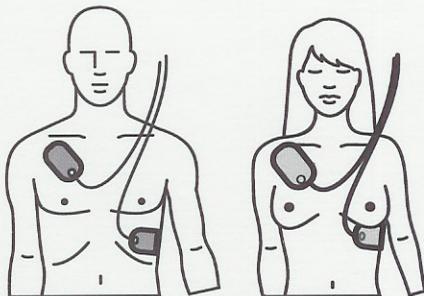


6

Analizando... no interferir

ESPERE HASTA QUE



DEJE DE PARPADEAR

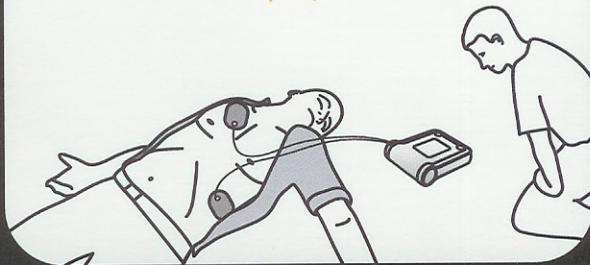

7

Pulse el botón naranja parpadeante de descarga.



8

Ayuda para RCP: presione el botón azul parpadeante.




BEBÉS/NIÑOS

< 25 kg (0-8 años)



BEBÉS/NIÑOS

Inserte llave al empezar la reanimación.

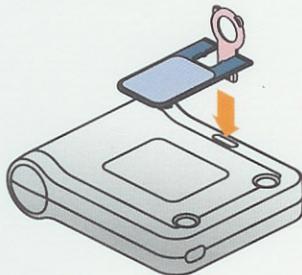

Coloque los electrodos en la espalda y el pecho.

